

# Pre-Seed®

## Glijmiddel

voor paren met een kinderwens  
Vruchtbaarheidsvriendelijk

- ✓ Pre-Seed® creëert een ideale omgeving voor het sperma
- ✓ Klinisch getest en wereldwijd aanbevolen door artsen
- ✓ ph-waarde 7,3

AUB de gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig lezen!


### Gebruiksaanwijzing

1) Neem de applicator uit de verzegelde foliezak. De sluitdop van de tube nog NIET verwijderen.

Aanwijzing: Als de sluitdop geopend of beschadigd is, het product niet gebruiken, maar zo volledig mogelijk daar teruggeven waar het is gekocht.

2) Pak de applicator aan het onderste einde (bus), houdt hem met de punt naar beneden en schudt applicator zoals een koortsthermometer, zodat de inbrenghuls met *Pre-Seed* wordt gevuld.

3) Draai de hoekige sluitdop van de applicator volledig af.

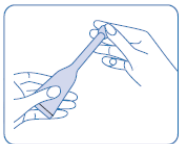

4) *Pre-Seed* kan in een tijdsbestek van maximaal 15 minuten voor het geslachtsverkeer in de schede worden ingebracht. Door tijdig gebruik kan *Pre-Seed* zich gelijkmatig in de schede verdelen en vereist geen verdere onderbreking bij het liefdesspel.

5) Breng de applicator voor het inbrengen

zo ver mogelijk in de schede in. Dit kan naar eigen voorkeur staande, liggend of zittend gebeuren.



6) Na het invoeren drukt u de applicator grondig uit, zodat *Pre-Seed* zich volledig in de vaginale ruimte kan verdelen. Bij het eruit trekken houdt u de applicator samengedrukt, zodat hij geen werkzame stof terug kan zuigen. De lege applicator bij het huishoudelijk afval weggoeien.

7) Om overtollig glijmiddel te verwijderen, buigt u zich na het inbrengen een keer naar voren. Daardoor wordt de vaginale ruimte samengedrukt en overtollig glijmiddel eruit gedrukt.

8) Als u de applicator niet volledig heeft geleegd, dient u de rest weg te gooien. Het is niet aan te raden, het aangebroken product verder te gebruiken of te bewaren.

### Belangrijke aanwijzingen

- *Pre-Seed* is GEEN voorbehoedsmiddel. Het biedt spermatozoën een optimale omgeving en bevordert hun werking.
- *Pre-Seed* is erg glibberig. Per ongeluk gemorst materiaal daarom meteen afvegen – gevaar voor uitglijden!
- Als zich bij het gebruik van *Pre-Seed* irritaties of een onaangenaam gevoel mochten voordoen, het product niet verder gebruiken. Mochten deze problemen voortduren, s.v.p.uw arts consulteren.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Ongeopende verpakking(en) bewaren bij kamertemperatuur.
- Bij een infectie of verwondingen van de schede mag het product **niet** worden gebruikt. Na operatieve ingrepen voor gebruik uw arts consulteren.